



GSD NovaGen SARS-CoV-2 (COVID-19)

Antigen Rapid Test

Test inmunocromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de coronavirus 2 asociado al síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) en una muestra clínica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resultados rápidos en 15 minutos
- Tipo de muestra: Nasofaríngea
- Fácil de usar; no se requiere equipo adicional
- Transporte y almacenamiento a temperatura ambiente
- Sensibilidad: 92.6% ; Especificidad: 98.6%
- CE-IVD

GSD NovaGen SARS-CoV-2 (COVID-19)


Antigen Rapid Test




La prueba rápida de antígeno GSD NovaGen SARS-CoV-2 (COVID-19) completa el panel de diagnóstico del Gold Standard Diagnostics Group para SARS-CoV-2: ELISA, RT-PCR y kits de extracción de ARN. Esta prueba de inmunocromatografía cumple con los criterios de la OMS para test rápidos de antígeno (sensibilidad $\geq 80\%$; especificidad $\geq 97\%$) para su uso en la lucha mundial contra COVID-19.

Procedimiento

Después de la toma de la muestra, inserte el hisopo en el tubo que contiene la solución tampón. Gire el hisopo durante un minuto y cierre la tapa del tubo. Utilice el gotero para transferir 3 gotas (aproximadamente 100 μL) de la muestra diluida al pocillo de la muestra (S) del test e inicie el temporizador. Lea el resultado a los 15 minutos.

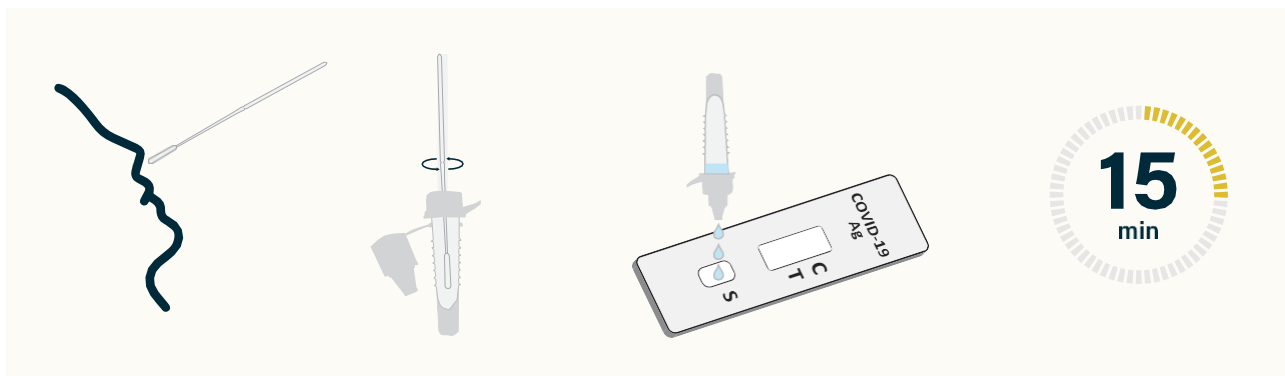

Interpretación de Resultados

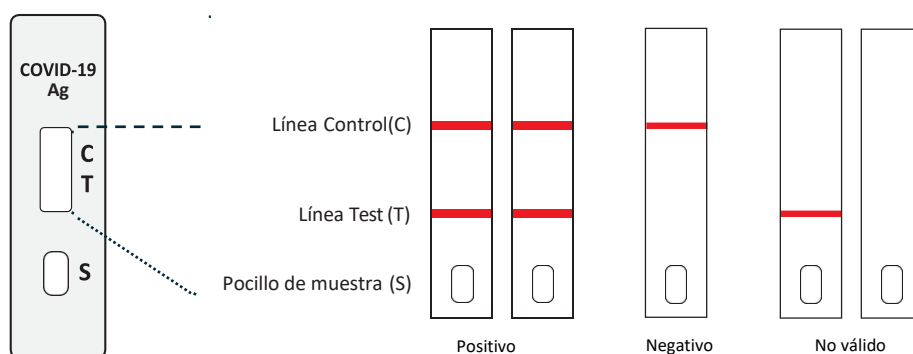

Información de Producto

Descripción	Referencia	Formato
GSD NovaGen SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test	CVAG4940	20 tests

Fabricante: **Edinburgh Genetics Limited**
Distribuidor: **NovaTec Immundiagnostica GmbH**
Distribuido en España por **Eurofins Ingenasa**

eurofins | **Ingenasa**

Pedidos: facturacion@ingenasa.com
Soporte Comercial: christianordonez@eurofins.com
Av. De la Institucion Libre de Enseñanza 39, 28037, Madrid