

Cera para Huesos Atramat

Este documento no es referencia sobre técnicas quirúrgicas, está diseñado para asistirle en el uso del producto.

Descripción

La **Cera para Huesos Atramat®**, es una mezcla de cera de abeja obtenida por fusión con agua caliente de las paredes del panel de abeja *Apis mellifera* Linné y palmitato de isopropilo, el cual es un disolvente con buena emulsionabilidad. La **Cera para Huesos Atramat®** es opaca y presenta un olor y color característico.

Indicaciones de Uso

La **Cera para Huesos Atramat®** se utiliza para controlar el sangrado de las superficies óseas, actuando mediante taponamiento físico de los canales óseos. Una vez abierta la **Cera para Huesos Atramat®**, deberá ser ablandada mediante el uso de una técnica aséptica, hasta lograr la consistencia deseada, la cual será aplicada a la superficie ósea según se requiera en el procedimiento quirúrgico y a la preferencia del cirujano.

Modo de Acción

La **Cera para Huesos Atramat®** logra la hemostasia local de huesos al actuar como barrera mecánica (tapón), por ser un material no absorbible e inerte que no tiene una acción bioquímica con el organismo. La cera para Huesos Atramat® solo se recomienda como hemostático local óseo.

Contraindicaciones

La **Cera para Huesos Atramat®** no debe utilizarse cuando la fusión ósea sea requerida ya que puede actuar como una barrera artificial y contrarrestar la regeneración ósea (osteogénesis).

Reacciones Adversas

Las reacciones adversas asociadas con el uso de la **Cera para Huesos Atramat®** incluyen: irritación local transitoria en la zona de la herida y en tejidos inmediatamente adyacentes al sitio de la implantación. La **Cera para Huesos Atramat®** puede agravar una infección bacteriana existente.

Advertencias

Antes de utilizar la **Cera para Huesos Atramat®** el usuario debe conocer a fondo los procedimientos y técnicas quirúrgicas, así como las técnicas aplicables a este tipo de dispositivo. Para el manejo de heridas infectadas o contaminadas se deberá seguir técnicas quirúrgicas adecuadas.

Precauciones

No reutilizar, por ser un dispositivo médico, se presenta estéril para un solo uso. En caso de que alguna parte no se utilice al finalizar la cirugía se deberá desechar. La **Cera para Huesos Atramat®** por razones de asepsia no deberá ser reutilizada, ya que podría contravenir en la técnica quirúrgica y poner en riesgo al paciente con una posible infección. La **Cera para Huesos Atramat®** no deberá reesterilizarse por ningún método ya que puede provocar una alteración importante en la estructura química o física y poner en riesgo al paciente. No utilizar la **Cera para Huesos Atramat®** si el empaque se encuentra abierto o dañado, ya que se habrá perdido la esterilidad del producto. Desechar todo material contaminado siguiendo los procedimientos hospitalarios habituales y las precauciones para desechos biológicos infecciosos; de acuerdo a la legislación aplicable vigente de cada país.

Condiciones de Almacenamiento

El producto debe protegerse de la acción directa de la luz solar, conservándose en el envase original en lugares limpios y secos, a una temperatura de entre 15-30 °C (288-303 K) y humedad relativa menor a 65%. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.

Fecha de caducidad

5 años a partir de la fecha indicada en la etiqueta.

Presentación

La **Cera para Huesos Atramat®**, está disponible en las siguientes presentaciones: sobres individuales de 2.5 g, Caja con 6, 12, 24 y 36 piezas.

Simbología Internacional

	No Re-esterilizar		Número de Lote
	No Reusar		Fecha de Manufactura
	Consulte Instrucciones de Uso		Fecha de Caducidad
	No Usar si el Empaque Está Dañado		Esterilizado por Radiación Gamma
	Mantener Protegido de la Luz Solar		Fabricante
	Mantener Seco		Número de Catálogo
	Limite de Temperatura		Marca CE
	Limite de Humedad		Representante Autorizado en la Unión Europea



Obelis s.a

Bd. General Wahis 53,1030 Brussels, BELGIUM
Tel / Phone: +32 2 732 59 54, Fax: +32 2 732 60 03,
E-Mail: mail@obelis.net

Fabricado y distribuido en México por:

Internacional Farmacéutica, S.A. de C.V.
Carreteraco No. 44, Colonia Parque San Andrés,
Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México, México.
Tel. / Phone: +52 55 54 84 17 00
Fax: +52 55 55 49 42 34.

Planta Lerma
Internacional Farmacéutica, S.A. de C.V.
Circuito de la Industria Poniente Lote 10-C,
Colonia Parque Industrial El Cerrillo, C.P. 52000,
Lerma, Estado de México, México.
Tel./Phone: +52 728 285 3036
Fax: +52 728 285 3918

© Internacional Farmacéutica, S.A. de C.V.

www.atramat.com
atencion.ciente@atramat.com - customer.care@atramat.com