



Guía de uso Oracell®

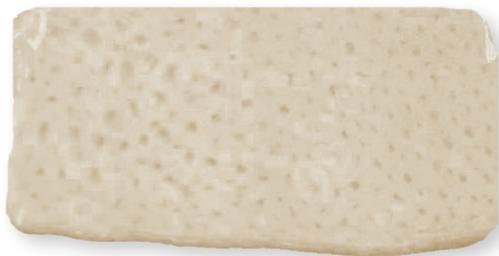

Reticular (dérmica):

Apariencia más liviana, con poros más grandes, que absorbe la sangre

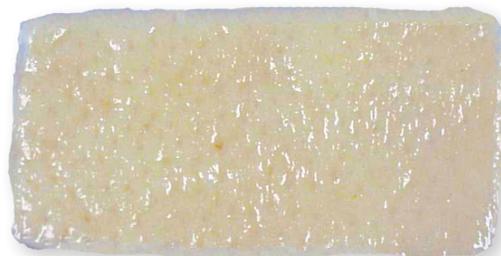

Papilar (membrana basal):

Más opaca con poros más pequeños, que repele la sangre

Instrucciones generales

- Usar una sola vez con un solo paciente únicamente.
- Una vez que el envase está abierto, la dermis debe utilizarse para el procedimiento actual o descartarse.
- Toda dermis sin usar debe descartarse.
- Inspeccione con atención la dermis, los envases interno y externo y las etiquetas.
- No use el producto después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- No use el producto si la dermis está dañada o si la integridad del envase está afectada.
- No use el producto si hay discrepancias en la información de la etiqueta.
- Si hay un punto termosensible, no utilice la dermis si el punto muestra un color distinto del blanco.
- Use una técnica aséptica en todo momento.
- No esterilice el producto.
- Almacene la dermis según las instrucciones de almacenamiento recomendadas hasta su preparación para la implantación.

Posible aplicación	Código Oracell (OCELL)
Membrana (contención del injerto óseo)	150, 250
Recesión gingival	100, 101, 151, 200, 201
Corrección de tejido blando (encia insuficiente)	100, 101, 151, 200, 201
Preparación del implante	200, 201, 250, 251

	OCELL 100	OCELL 101	OCELL 150	OCELL 151	OCELL 200	OCELL 201	OCELL 250	OCELL 251
Espesor	0,76-1,25 mm	0,76-1,25 mm	0,76-1,25 mm	0,76-1,25 mm	1,26-1,75 mm	1,26-1,75 mm	1,26-1,75 mm	1,26-1,75 mm
Tamaño	15 x 20 mm	20 x 40 mm	10 x 10 mm	10 x 40 mm	15 x 20 mm	20 x 40 mm	10 x 10 mm	10 x 40 mm

Preparaciones para uso

Orientación: La dermis descelularizada tiene dos lados físicamente diferentes: un lado reticular y uno papilar. En general, al aplicarla, el lado papilar queda hacia arriba y el lado reticular se coloca contra la herida quirúrgica o el tejido más vascularizado. La dermis está envasada con el lado papilar visible a través del lado transparente del envase.

1. Miembro del equipo no esterilizado: Abra la funda de cartón y retire la bolsa interna.
2. En forma aséptica, abra el envase externo y entregue la bolsa interna al Miembro del equipo esterilizado.
3. Miembro del equipo esterilizado: Para mantener la orientación de la dermis, el lado papilar debe indicarse con un marcador estéril inmediatamente después de abrir la bolsa interna. La dermis está envasada con el lado papilar visible a través del lado transparente del envase.
Dermis: Abra la bolsa interna y retire la dermis con la hoja deslizante. Retire la hoja deslizante antes de la aplicación.
4. **NOTA:** No es necesario enjuagar el bioimplante antes de la aplicación; sin embargo, es posible que hacerlo mejore la manipulación. Si el médico prefiere enjuagarlo, siga las instrucciones de enjuague.
Si no se usa de inmediato, mantenga la dermis húmeda hasta la implantación.
5. **Instrucciones de enjuague (optativo)**
6. Miembro del equipo no esterilizado: Prepare un recipiente de enjuague estéril con suficiente solución isotónica estéril (p. ej., solución salina estéril) para cubrir por completo la dermis. **PRECAUCIÓN:** La solución de enjuague no debe exceder los 42 °C, dado que esto podría dañar la dermis.
7. Miembro del equipo esterilizado: Después de abrir el envase según las instrucciones previas, retire la dermis de la hoja deslizante y sumérgala en la solución isotónica estéril durante un mínimo de 1 minuto. Verifique que la dermis esté completamente sumergida en la solución durante el enjuague.

Mantenga la dermis completamente sumergida en la solución isotónica estéril hasta que se la necesite.

El período máximo de exposición de la dermis descelularizada a la solución isotónica estéril es de 4 horas.

LifeNet Health ayuda a salvar vidas, restaurar la salud y brindar esperanza a miles de pacientes cada año. Somos el proveedor de soluciones de trasplantes más confiable a nivel mundial, desde la obtención de órganos hasta el desarrollo de nuevas e innovadoras tecnologías de bioimplantes y terapias celulares. Somos la empresa líder en el campo de la medicina regenerativa y, al mismo tiempo, respetamos a los donantes y profesionales de la salud que hacen posible el proceso de curación.

G Para uso en: **mercados globales**

1864 Concert Drive
Virginia Beach, VA 23453
1-888-847-7831 (EE. UU. y Canadá)
1-757-464-4761 int. 2000
(fuera de los EE. UU.)

www.LifeNetHealth.org

Es una marca registrada de LifeNet Health, Inc.
©2017 LifeNet Health. Todos los derechos reservados.
68-00-055-ES Rev.00

