



PASO A PASO

CLEAN&SEAL® ofrece un tratamiento subgingival en dos fases (limpiar y sellar), para terapia de bolsas infectadas tanto en periodontitis como en periimplantitis.

CLEAN: FASE 1 - CON PERISOLV®



Perisolv® debe mantenerse refrigerado.



No enjuagar con productos que contengan Clorhexidina (CHX) antes, durante, o después del tratamiento.

1 MEZCLADO DE LAS JERINGAS



Leer el prospecto y la caja para la preparación del gel limpiador con los componentes de las dos jeringas.

2 INYECTAR



- > Rellenar las bolsas a tratar con el gel limpiador.
- > Evitar sobrellenar las bolsas.

EL PERISOLV ACTUA

Dejar actuar el gel limpiador unos 60 segundos.



4 DESBRIDAMIENTO MECÁNICO



Realizar una instrumentación completa de la bolsa y de la superficie de la raíz. Retirar los residuos y tejido de granulación con unas pinzas.

5 ENJUAGUE




Después de la limpieza mecánica, enjuagar la bolsa con suero fisiológico hasta asegurarse de que no queden restos visibles en el interior de la bolsa. No CHX.



6 CICLO DE LIMPIEZA ADICIONAL.

- > Rellenar la bolsa de nuevo con Perisolv® asegurándose de que no queden restos de biofilm en la bolsa, como está descrito en el punto 5.
- > Realizar otra instrumentación como en el punto 4.
- > Para bolsas periodontales se recomienda repetir este ciclo 3-4 veces. Para bolsas periimplantarias se recomienda repetir este ciclo 4-7 veces.

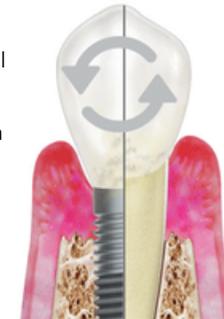

7 ENJUAGUE



Enjuagar completamente la bolsa con suero fisiológico para retirar posibles restos de Perisolv. No CHX.






PASO A PASO

SEAL: FASE 2 - CON HYADENT BG

1 PREPARACIÓN

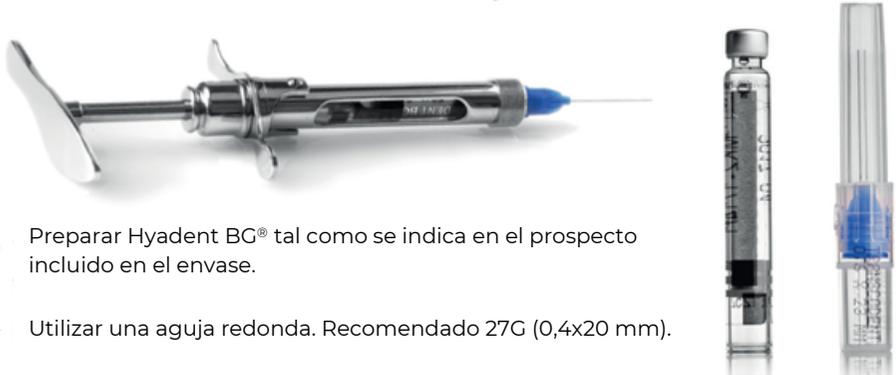

- > Preparar Hyadent BG® tal como se indica en el prospecto incluido en el envase.
- > Utilizar una aguja redonda. Recomendado 27G (0,4x20 mm).

2 SELLADO DE LA BOLSA



- > Rellenar la bolsa con Hyadent BG® desde apical hasta coronal



Después del tratamiento, el paciente **no debería comer ni beber nada durante dos horas**, para que el Hyadent BG empiece a actuar.



No utilizar **enjuagues bucales** con clorhexidina hasta dos días después del tratamiento.

Abstenerse de utilizar cepillo dental o interproximal durante la primera semana después del tratamiento.



3 DOSIS DE RECUERDO



- > Si es posible, realizar un relleno de la bolsa con Hyadent BG® en una revisión dentro de las dos primeras semanas del primer tratamiento.

4 RE-EVALUACIÓN

Involucrar al paciente para hacer revisiones regulares. Se recomienda hacer seguimiento del paciente a las **3 y a las 6 semanas** para evaluar la cicatrización. Revisión final a los 3 meses.

Es importante seguir las recomendaciones de la EFP (European Federation of Periodontology) y evitar hacer un sondaje de la bolsa en los próximos 3 meses.



SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

A los 3 meses aproximadamente, se debería examinar la situación clínica para revisar la evolución de los parámetros clínicos (BOP, CAL, PD).