



Información para higienistas

¿Cómo tratas a tus pacientes con periodontitis cada vez más avanzada?

LA TERAPIA CIENTÍFICAMENTE PROBADA
CLEAN&SEAL TE AYUDA A PRESERVAR DIENTES

Texto adaptado por:

Preserva dientes afectados de periodontitis severa en 1 sola visita

CLEAN&SEAL es una terapia adyuvante que consta de 2 pasos, para el tratamiento de la periodontitis y de las infecciones periimplantarias. En combinación con tu sistema de limpieza mecánica preferido, se utiliza en casos de periodontitis severa (PD>5 mm).



CLEAN&SEAL+ SRP vs SRP solo, a los 6 meses:

- > 57% mejoría de PD*
- > 61% mejoría de CAL*
- > 96% mejoría de BOP*
- > 1,5-2 mm de mejora de CAL incluso en casos de furca**



PASO 1: CLEAN (FACILITA LA LIMPIEZA DE LA BOLSA)

- Qué:** Gel con hipoclorito de sodio y aminoácidos.
- Cómo:** Inyectar en la bolsa, y a los 60 seg. hacer limpieza mecánica.
- Porqué:**
- > Facilita la limpieza y reduce la morbilidad.
 - > Ablanda el biofilm y reduce la carga bacteriana.
 - > Prepara la superficie del diente para la regeneración.



PASO 2: SEAL (PROTEGE LA BOLSA Y REGENERA TEJIDOS)

- Qué:** Gel con ácido hialurónico reticulado.
- Cómo:** Rellenar la bolsa con el gel
- Porqué:**
- > Protege la bolsa de patógenos orales.
 - > Estimula la regeneración de cemento, PDL y hueso para una mejor adhesión.
 - > Reduce la inflamación y el dolor.

Cortesía Dra. Vanessa Ruiz Magaz



Paso a paso
Clean&Seal



Más info
Clean&Seal



FAQs
Clean&Seal

REFERENCIAS

- *Ramanauskaite et al 2023
**Diehl et al 2022